

Sodík (odpad za 24h)

Natrium - sodík (sodný kation) - ztráty moči (24 h sběr moče, odpad)	
Metoda	ISE s dilucí
Primární vzorek (biologický materiál)	Sbíraná moč za 24 hodin
Odběrová souprava	Plastová sběrná nádoba bez konzervace
Poznámka k odběru	Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad.
Pokyny pro pacienta	
Podmínky transportu	15 - 25 °C
Stabilita	14 dní při 2 - 8 °C
Doordinace	7 dní při 2 - 8 °C
Doba dodání	V den doručení (odpoledne)

Referenční meze

Věk od - do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
0D - 6M	1	10	mmol/d
6M - 1R	10	30	mmol/d
1R - 7R	20	60	mmol/d
7R - 15R	50	120	mmol/d
15R - 110R	80	220	mmol/d

Zdroj referenčních mezí: Tomáš Zima - Laboratorní diagnostika

Revize	28. 11. 2024
Autor:	Ing. Petra Kabeleová
Metoda je akreditována	