

PSA celkový

PSA celkový / Prostatický specifický antigen	
Metoda	Elektrochemiluminiscence
Primární vzorek (biologický materiál)	Plná krev
Odběrová souprava	 Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
Pokyny k odběru a příprava pacienta	Odběr nejdříve 48 hodin po každém vyšetření per rectum nebo po masáži prostaty a nejdříve 2 týdny po biopsii prostaty. Před odběrem je nutné se vyvarovat fyzické aktivity, která by měla za následek pohmoždění parenchymu prostaty např. sex, jízda na kole, na koni apod.
Podmínky transportu	15 - 25 °C
Stabilita	8 hodin při 20 °C, 5 dní při 2 - 8 °C
Doordinace	5 dní
Doba dodání	V den doručení (odpoledne)

Referenční meze

Věk od - do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
M 0R - 50R	0	2,5	µg/l
M 50R - 60R	0	3,5	µg/l
M 60R - 70R	0	4,5	µg/l
M 70R - 110R	0	6,5	µg/l

Revize	27. 11. 2024
Autor:	Ing. Petra Kabeleová
Metoda je akreditována	