

# PSA volný

| PSA volný                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metoda                                | Elektrochemiluminiscence                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Primární vzorek (biologický materiál) | Plná krev                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Odběrová souprava                     | <div></div> <p>Vacuette červený uzávěr<br/>- plast se sep. gelem</p>                                                                                                                                     |
| Pokyny k odběru a příprava pacienta   | <p>Odběr nejdříve 48 hodin po každém vyšetření per rectum nebo po masáži prostaty a nejdříve 2 týdny po biopsii prostaty.</p> <p>Před odběrem je nutné se vyvarovat fyzické aktivity, která by měla za následek pohmoždění parenchymu prostaty např. sex, jízda na kole, na koni apod.</p> |
| Podmínky transportu                   | 15 - 25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Stabilita                             | 8 hodin při 20 °C, 5 dní při 2 - 8 °C                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Doordinace                            | 5 dní                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Doba dodání                           | V den doručení (odpoledne)                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Referenční meze

Nejsou stanoveny. Používá se pro výpočet poměru FPSA/PSA

|        |                      |
|--------|----------------------|
| Revize | 25. 11. 2024         |
| Autor: | Ing. Petra Kabeleová |