

Homocystein

Homocystein v plazmě	
Metoda	Absorpční spektrofotometrie
Primární vzorek (biologický materiál)	Plná krev
Odběrová souprava	 Vacuette fialový uzávěr - EDTA plazma, nutné být vždy nalačno!!!
Pokyny pro pacienta	
Pokyny pro odebírající personál	• Odebrat samostatnou zkumavku na homocystein, viditelně označit a po odběru uložit ihned do lednice. • Pokud je zároveň i zkumavka na krevní obraz, tuto zkumavku uchovávat při pokojové teplotě!!! Neukládat do lednice!!! Výsledky pak mohou být ovlivněny sníženou stabilitou homocysteinu.
Podmínky transportu	Plná krev při 2 - 8 °C
Stabilita	6 hodin při 2 - 8 °C!!!
Doordinace	nelze
Doba dodání	V den zpracování (odpoledne)

Referenční meze

Věk od - do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
0D - 15R	3,50	10	umol/l
15R - 65R	3,50	15	umol/l
65R - 99R	3,50	20	umol/l

Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Beckman Coulter

Revize	29. 11. 2024
Autor:	Ing. Petra Kabeleová