

Uricult

Uricult	
Metoda	Uricult: V případě, že podmínky nedovolují rychlý transport moči do laboratoře, je možné moč odebrat do odběrové soupravy Uricult.
Primární vzorek (biologický materiál)	Moč - Uricult
Odběrová souprava	 Uricult
Pokyny k odběru a příprava pacienta	Pacient zachytí do sterilního kelímku střední proud moče. Z Uricultu vyjměte destičku s agarovými půdami a ponořte ji do moče tak, aby část s agarem byla zcela ponořena. Po několika vteřinách ji vyjměte a uzavřete zpět do plastové zkumavky. Kelímek s močí zlikvidujte. Nenaplňujte Uricult močí.
Podmínky transportu	Přepravní box: 15 - 25 °C
Stabilita	Pokojová teplota, nikdy neukládejte do lednice.
Doordinace	
Doba dodání	Negativní: 2 dny Pozitivní: 2 - 5 dní

Poznámka:

Mykologické vyšetření nelze z Uricultu provést, v případě požadavku zašlete vzorek moči ve sterilní zkumavce.

Revize

30. 7. 2024

Autor:

Mgr. Markéta Tomšíčková