

PSA volný

PSA volný	
Metoda	Elektrochemiluminiscence
Primární vzorek (biologický materiál)	Plná krev
Odběrová souprava	 <p>Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem</p>
Pokyny k odběru a příprava pacienta	<p>Odběr nejdříve 48 hodin po každém vyšetření per rectum nebo po masáži prostaty a nejdříve 2 týdny po biopsii prostaty.</p> <p>Před odběrem je nutné se vyvarovat fyzické aktivity, která by měla za následek pohmoždění parenchymu prostaty např. sex, jízda na kole, na koni apod.</p>
Podmínky transportu	15 - 25 °C
Stabilita	8 hodin při 20 °C, 5 dní při 2 - 8 °C
Doordinace	5 dní
Doba dodání	V den doručení (odpoledne)

Referenční meze

Nejsou stanoveny. Používá se pro výpočet poměru FPSA/PSA

Revize	25. 11. 2024
Autor:	Ing. Petra Kabeleová