

Homocystein

Homocystein v plazmě

Metoda Absorpční spektrofotometrie

Primární vzorek (biologický materiál) Plná krev

Odběrová souprava



Vacuette fialový uzávěr - EDTA plazma, nutné být vždy nalačno!!!

Pokyny pro pacienta

Pokyny pro odebírající personál

- Odebrat samostatnou zkumavku na homocystein, viditelně označit a po odběru uložit ihned do lednice.
- Pokud je zároveň i zkumavka na krevní obraz, tuto zkumavku uchovávat při pokojové teplotě!!! Neukládat do lednice!!! Výsledky pak mohou být ovlivněny sníženou stabilitou homocysteinu.

Podmínky transportu Plná krev při 2 - 8 °C

Stabilita 6 hodin při 2 - 8 °C!!!

Doordinace nelze

Doba dodání V den zpracování (odpoledne)

Referenční meze

Věk od - do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
0D - 15R	3,50	10	umol/l
15R - 65R	3,50	15	umol/l
65R - 99R	3,50	20	umol/l

Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Beckman Coulter

Revize	29. 11. 2024
Autor:	Ing. Petra Kabeleová